



**Инструкция по подключению тонометра
UA-911BT-C
к мобильному приложению **A&D Connect**
на платформе **Android****






Содержание




1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (Play Market).....	3
2. Включение Bluetooth	4
3. Начало работы с A&D Connect.....	5
4. Настройка устройства (Тонометр UA-911BT-C).....	6
5. Результаты работы прибора и программы после измерений.....	7
6. Главное окно мобильного приложения A&D Connect.....	8

1. Поиск и установка мобильного приложения A&D Connect (Play Market)

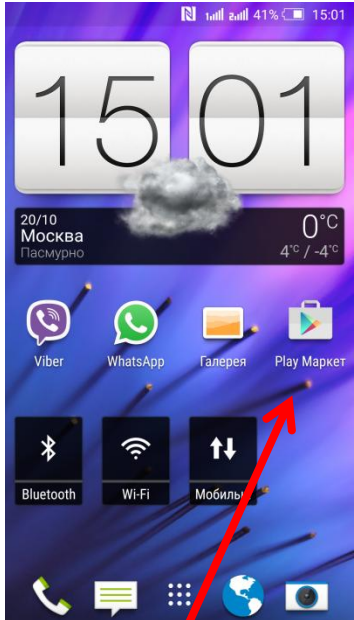

Открываем приложение Play Market

1

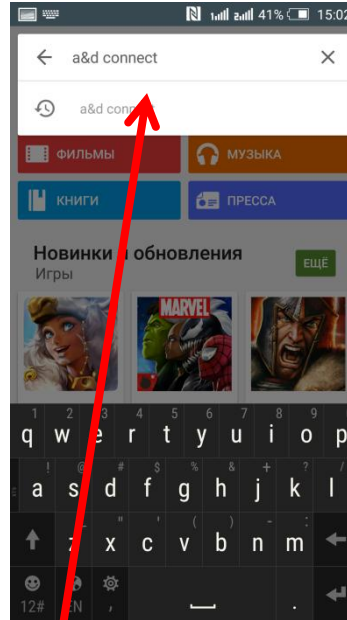


В поисковой строке набираем название программы A&D Connect Smart. Нажимаем на иконку приложения A&D Connect

ВНИМАНИЕ!

Если не удастся найти приложение A&D Connect Smart, проверьте совместимость Вашей модели смартфона на сайте <http://www.wellnessconnected.jp/english/compatibility/>


2

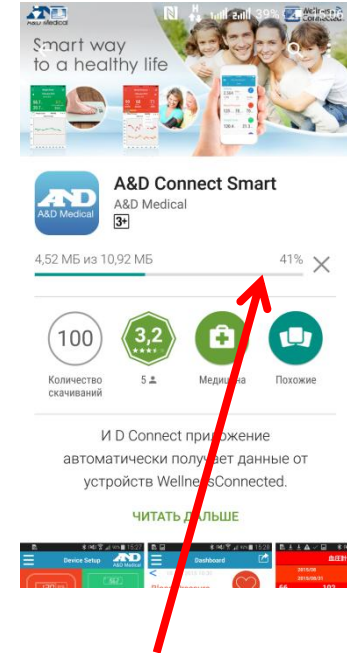

В окне приложения нажимаем кнопку «Установить» и ожидаем скачивание и установку программы пока не появится кнопка «Открыть». После установки нажимаем кнопку «Домой»


3

2. Включение Bluetooth

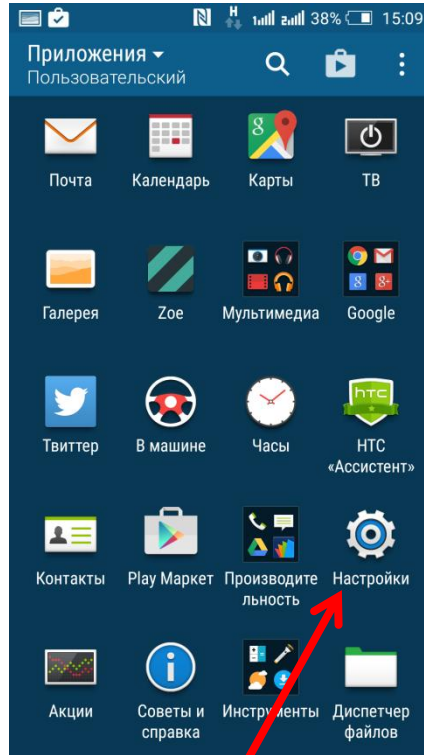

Заходим в пункт
«Настройки»

1

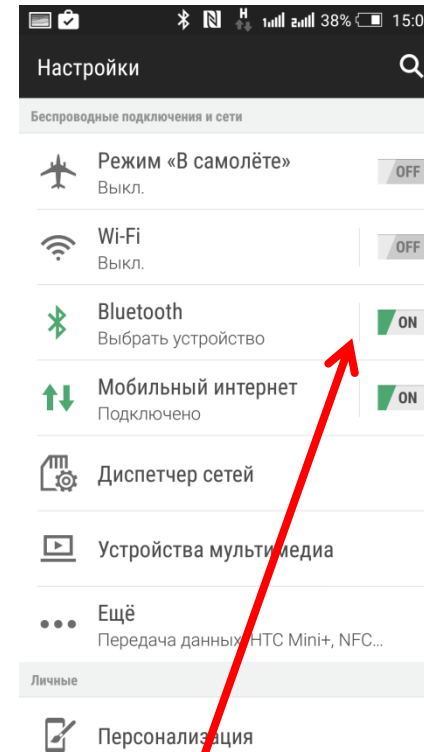

Выбираем пункт
Bluetooth. Делаем
индикатор Bluetooth
активным. После
установки нажимаем
кнопку «Домой»

2



3. Начало работы с A&D Connect




Запускаем приложение A&D Connect

1




Нажимаем на кнопку «Продолжить»

2

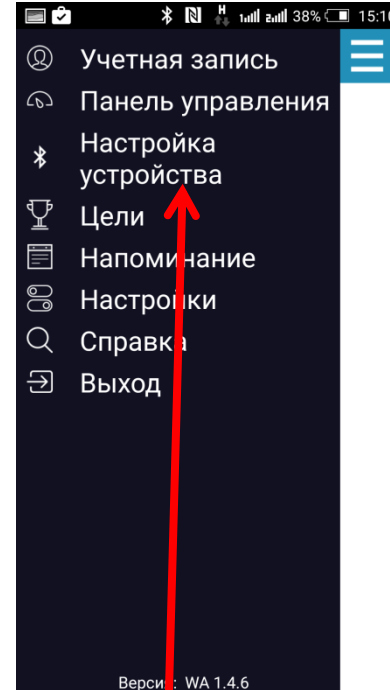


В меню приложения выбираем «Настройка устройства»

3

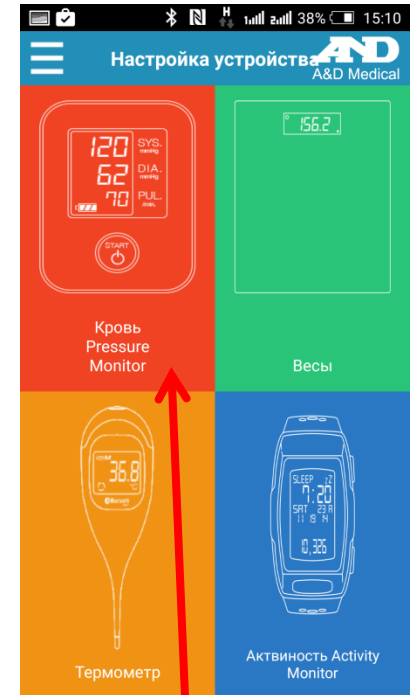

После успешно совершенных шагов Вы попадаете в окно «Настройка устройства»


4

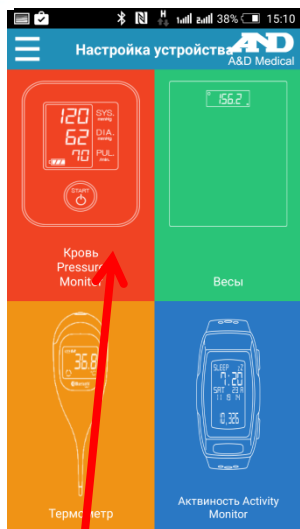


1 Подготовьте тонومتر UA-911BT-C. Нажмите в приложении на кнопку «Кровь Pressure Monitor»



2 Убедитесь что Bluetooth включен на Вашем устройстве.

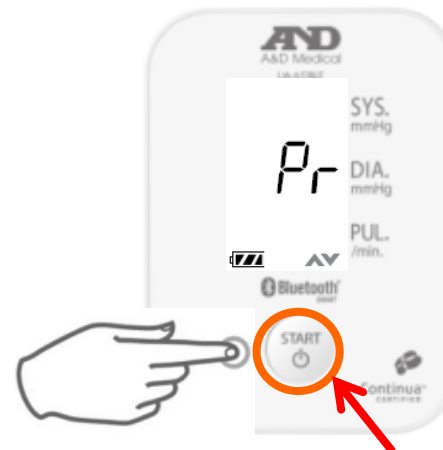


3 Нажмите и удерживайте кнопку «Старт» пока не увидите Pr на экране тонометра.

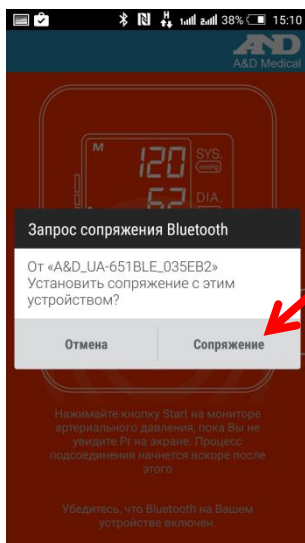

После соединения с тонометром появится окно «Запрос сопряжения Bluetooth». Подтверждаем сопряжение (на разных моделях смартфонов запрос сопряжения может появиться по другому)


4

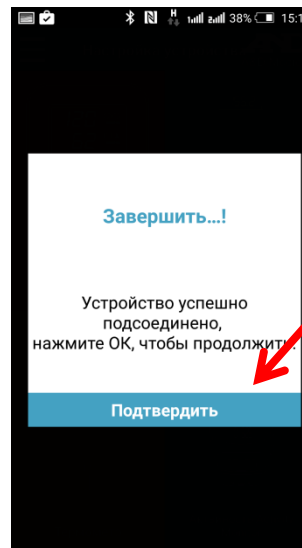

Устройство успешно подключено. Нажимаем Подтвердить и переходим в «Панель управления». Дождитесь пока на экране тонометра появится символ «End»

5

5. Результаты работы прибора и программы после измерений

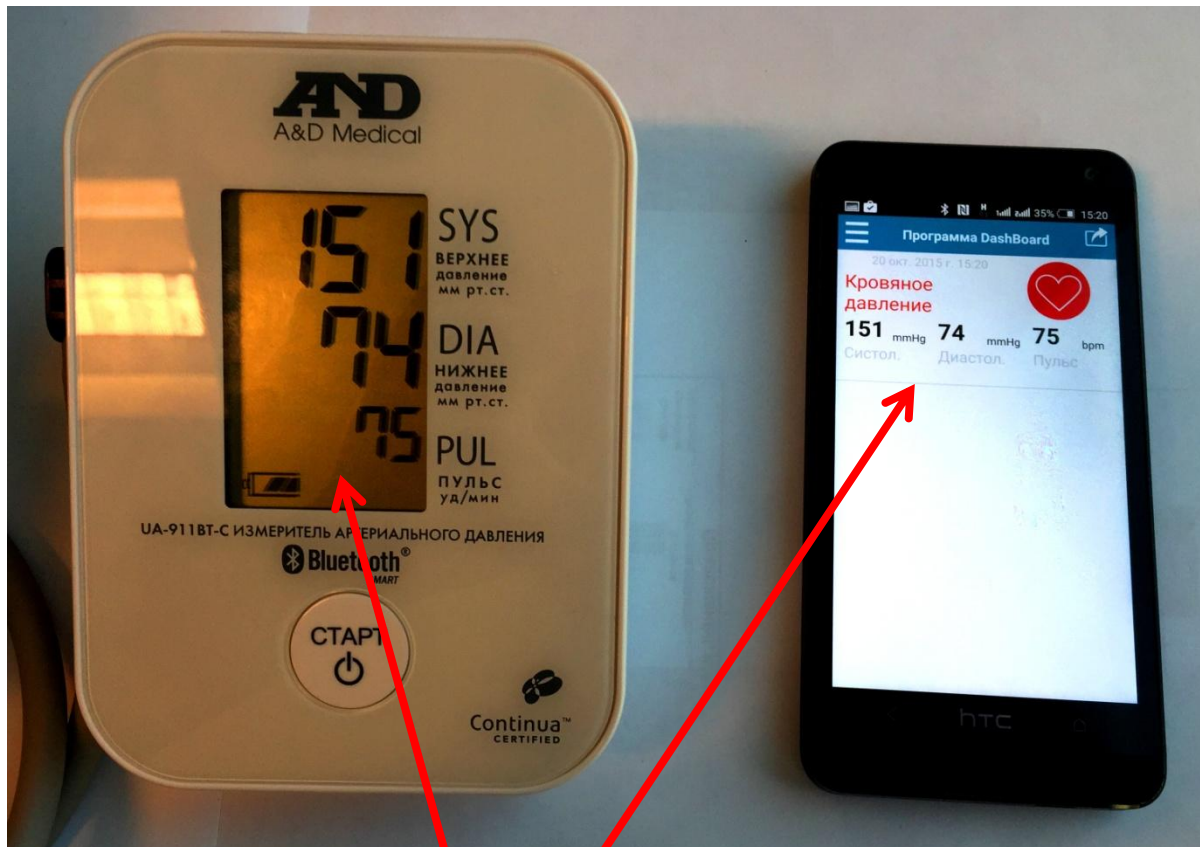


Откройте «Панель управления» на своем устройстве и сделайте измерение на тонометре. Данные передадутся на смартфон автоматически.

6. Главное окно мобильного приложения A&D Connect

Учетная запись. Вы можете заполнить свои персональные данные для формирования отчетов

В панели управления Вы можете получать данные с прибора, смотреть графики, статистику, формировать отчеты и экспортировать данные.

В настройке устройства Вы можете подключить тонометр к своему смартфону

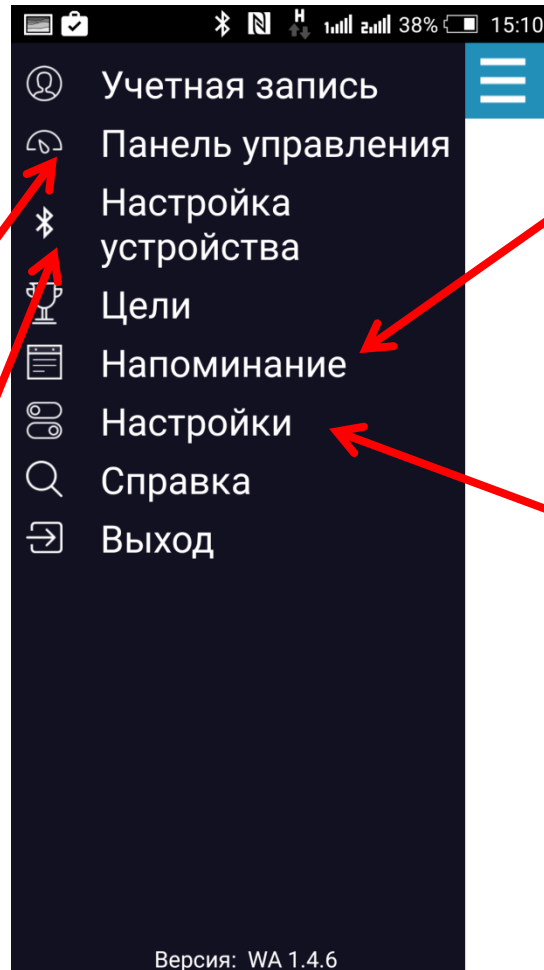

Установка напоминаний поможет Вам не забывать совершать измерения

В пункте настройки Вы сможете подключить учетную запись Microsoft Health Vault и синхронизировать свои данные с личной страницей на портале.